



1 Harrier Court
Airfield Business Park
Elvington
York YO41 4AU
Royaume-Uni
Tel: +44 (0) 1904 607600
Fax: +44 (0) 1904 607601
Web: www.vet-way.com

Biotect (EPI)

Produit	Code	Quantité par paquet	Poids Total (kgs)
Biotect EPI	PPE001	1	0.4

Éléments Fournis:

- Gants à usage unique en caoutchouc synthétique
- Combinaison
- Tampons alcoolisés
- Pochette de transport à usage unique
- Masque facial FFP3
- Lunettes de sécurité
- Sacs à déchets cliniques 9 kg UN3291
- Lingettes désinfectantes Bioguard
- Couvre-chaussures

Caractéristiques:

- Tampon doté d'une attache de fixation aux vêtements ou à la poche pour une utilisation plus facile
- Pochette de transport adaptée et à usage unique pour le transport de tout EPI jusqu'au site
- Combinaison entièrement élastiquée
- Masque facial à niveau de protection maximal (FFP3)
- Lunettes de sécurité avec serre-tête et orifices d'aération
- Lingettes désinfectantes Bioguard sous emballage individuel

L'Équipement de protection individuel (EPI) Biotect a été mis au point à l'aide des informations proposées sur le site Internet des CDC (Centres pour la Prévention et le Contrôle des Maladies) et à leur 'Directive Provisoire pour la protection des personnes impliquées dans des activités de lutte et d'éradication de la poussée endémique de grippe aviaire'.

Le kit propose tout le matériel nécessaire à la sécurité du personnel au stade du prélèvement d'échantillons.

Le kit comprend des gants en caoutchouc synthétique à usage unique, qui doivent être retirés immédiatement après usage avant de toucher tous quelconques objets non contaminés et surfaces de l'environnement. Les combinaisons doivent être portées comme protection extérieure, au-dessus des vêtements et les couvre-chaussures au-dessus des chaussures. Les lunettes de sécurité sont destinées à protéger les muqueuses des yeux et le masque respiratoire à usage unique permettant une protection de haut niveau de l'appareil respiratoire (FFP3) doit être placé sur toute la zone buccale.

Tout EPI fourni est à usage unique et doit être convenablement éliminé en étant placé dans la pochette de transport à usage unique puis dans le sac à déchets cliniques fournis. Le sac à déchets cliniques devra ensuite être détruit de façon appropriée. Des mesures d'hygiène pour les mains doivent être observées à l'aide des tampons alcoolisés et des lingettes Bioguard après avoir retiré tout PPE.

